


Quick Start Guide

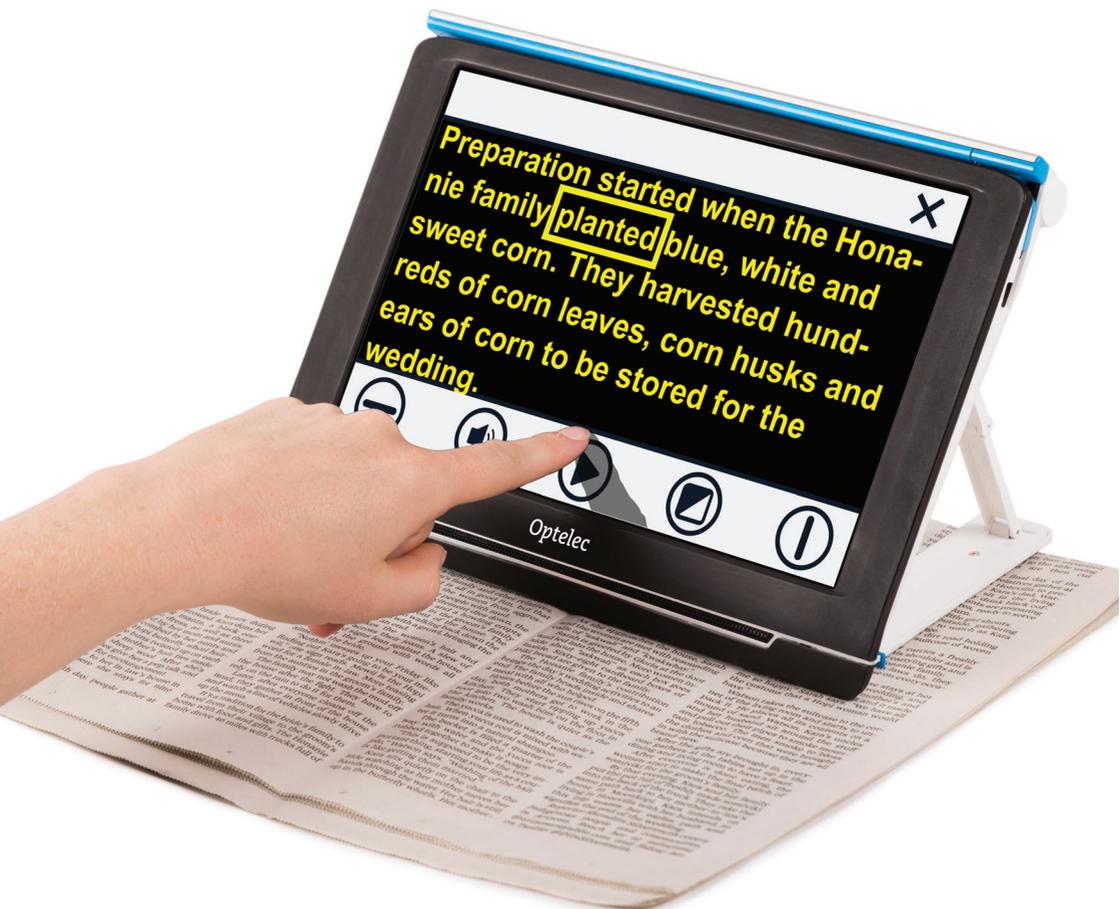

Mise en Route



1. Bras pivotant de la caméra: Pour utiliser les fonctions texte-à-parole d'une page entière, voir des objets et des photographies, et pour signer, ouvrez le bras pivotant de la caméra afin d'avoir plus d'espace.

2. Bouton On / Off:


Appui court: Sommeil / Reprise.

Appuyez pendant 6 secondes: On / Off.

3. Prise audio: Utilisez la prise audio pour connecter un casque au Compact 10 HD.

4. Connecteur USB-C: Charge Compact 10 batterie HD avec câble USB fourni et chargeur. SVP, veuillez charger la pile avant la première utilisation.


Mode Standard

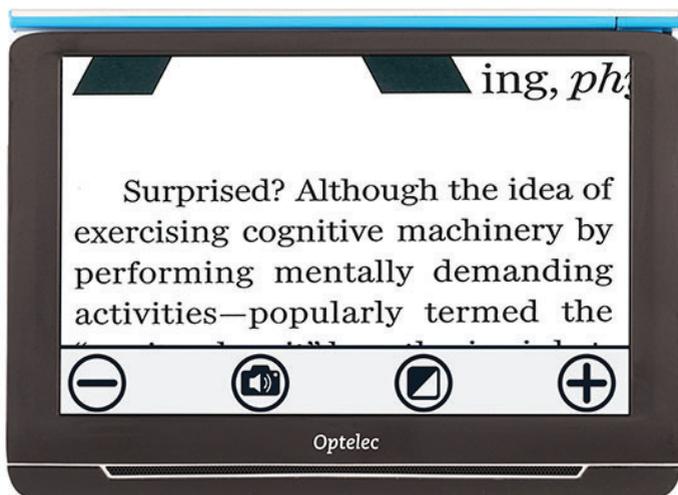

Pour basculer entre les modes Standard et Avancé, maintenez le bouton Mode enfoncé et sélectionnez votre choix. En mode Standard, les boutons suivants sont disponibles:

-  Diminuer le grossissement
-  Prendre une photo et utiliser la synthèse vocale
-  Appui court: Changer le mode de visualisation
Appui long: Mode Standard ou Avancé
-  Augmenter le grossissement

Mode Avancé

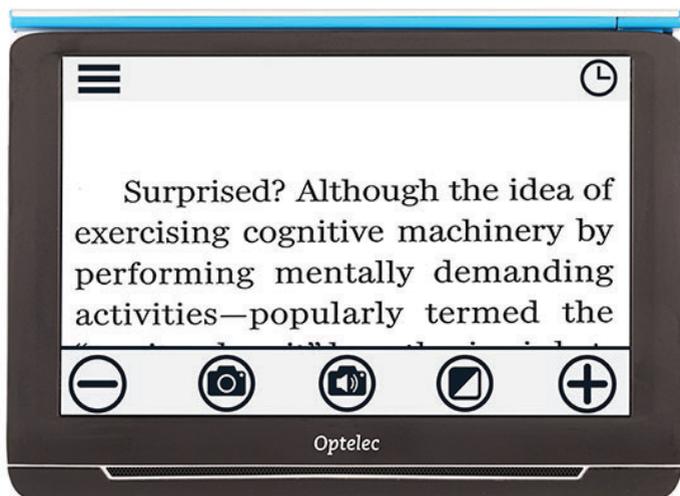

Pour basculer entre les modes Standard et Avancé, maintenez le bouton Mode enfoncé et sélectionnez votre choix. En mode Avancé, les boutons suivants sont disponibles en plus des boutons du mode Standard:

 Entrée dans le menu

 Horloge

 Prendre une photo d'une image

Affichage et signature



Pour voir des objets et des photographies, et pour signer, ouvrez le bras pivotant de la caméra afin d'avoir plus d'espace.

Le bouton suivant est disponible en plus:



Verrouillage de la mise au point marche/arrêt

Synthèse vocale



Lorsque vous utilisez la synthèse vocale sur une page entière, ouvrez le bras de la caméra et placez le document sous la caméra. Alignez le coin inférieur gauche du document sur le voyant bleu situé à la base du Compact 10 HD Speech.

Lors de l'utilisation de la synthèse vocale sur une partie d'une page, placez le Compact 10 HD Speech sur le document avec le bras de la caméra replié, puis positionnez le texte que vous souhaitez lire à l'écran.

Prenez une photo et laissez le Compact 10 HD Speech numériser le document et le lire à haute voix.

Après la photo



- ✕ Fermer la prise de photo
- ⊖ Diminuer le grossissement
- 🔊 Appui court: Ouvrir Volume et Vitesse de lecture
Appui long: Sélection des voix
- 🔊 Ajuster le volume
- ➡ Ajuster la vitesse de lecture
- ▶ Play / Pause
- 🖼️ Appui court: Changer le mode de visualisation
Appui long: Mode Standard ou Avancée
- ⊕ Augmenter le grossissement

Vue d'ensemble



Pour visualiser des objets de très près, fermez le support, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt et pointez Compact 10 HD sur ce que vous souhaitez lire ou afficher. Les boutons suivants sont disponibles:

-  Diminuer le grossissement
-  Prendre une photo et utiliser la synthèse vocale
-  Appui court: Changer le mode de visualisation
Appui long: Mode Standard ou Avancé
-  Augmenter le grossissement