

## Quick Start Guide



# Cómo empezar a trabajar



**1. Brazo desplazable:** Para hacer una captura de una página completa y activar la respuesta de voz, para visualizar objetos y fotos o para escribir su firma, abra el brazo desplazable para disponer de más espacio.

**2. Botón de encendido / apagado:**


Pulsación corta: suspender / reanudar.

Pulsar 6 segundos: encender / apagar.

**3. Conector de audio:** El conector de audio permite conectar auriculares a Compact 10 HD.



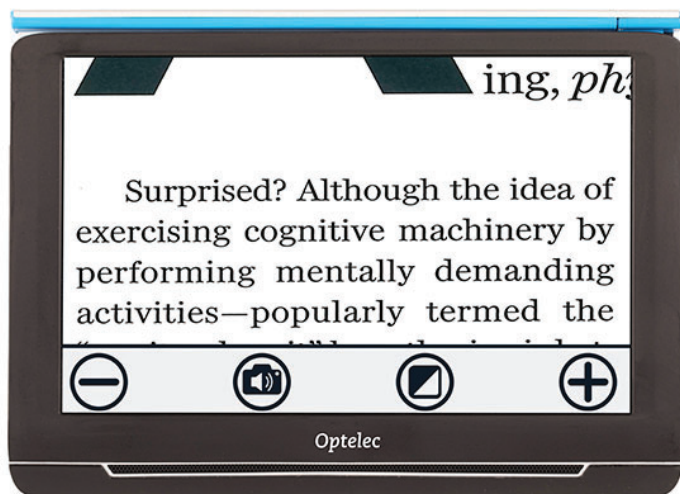

**4. Conector USB-C:** Cargue Compact 10 HD con el cable USB-C y el alimentador que se suministran con el equipo. Cargue la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

# Modo Básico




Para conmutar entre los modos Básico y Avanzado, toque y mantenga el botón Modo y seleccione una opción.

En el modo Básico están disponibles los siguientes botones:

-  Disminuir ampliación
-  Hacer una captura y escuchar el texto
-  Tocar: Cambiar vista  
Pulsación larga: Modo Básico o Avanzado
-  Aumentar ampliación

# Modo Avanzado

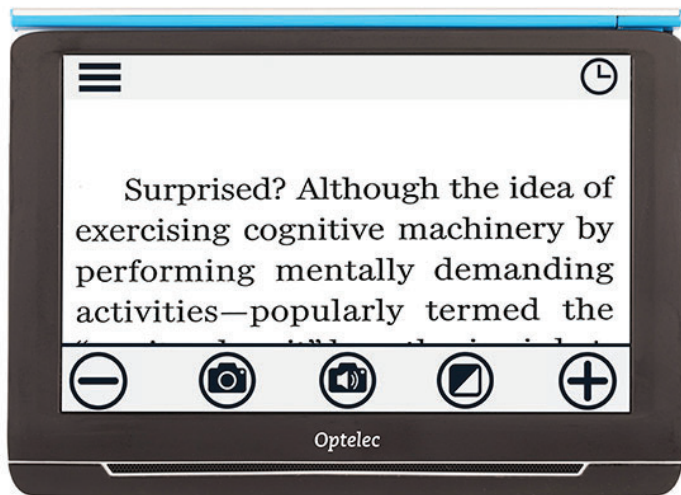

Para conmutar entre los modos Básico y Avanzado, toque y mantenga el botón Modo y seleccione una opción.

En el modo Avanzado están disponibles los siguientes botones además de los del modo Básico:



Abrir menú



Hora



Hacer una captura de una imagen

# Visualizar y firmar



Para visualizar objetos y fotos o para escribir su firma, abra el brazo desplazable para disponer de más espacio.

Además de los botones de Lectura está disponible el botón siguiente:



Activar/desactivar enfoque fijo

# Texto a voz



Para utilizar la función de texto a voz en una página completa, abra el brazo y sitúe el documento bajo la cámara. Alinee la esquina inferior izquierda del documento con el indicador azul que se encuentra en la base de Compact 10 HD Speech.

Si desea utilizar la función de texto a voz para leer una sección de la página, coloque Compact 10 HD Speech sobre el documento sin desplegar el brazo y sitúe en la pantalla el texto que desea leer.

Haga una captura y deje que Compact 10 HD Speech escanee el documento.

# Tras hacer una captura



Cerrar captura



Disminuir ampliación



Tocar: Abrir volumen y velocidad de lectura  
Pulsación larga: Selección de voz



Ajustar volumen



Ajustar velocidad de lectura



Reproducir/pausar lectura




Tocar: Cambiar vista  
Pulsación larga: Modo Básico o Avanzado



Aumentar ampliación

# Vista General

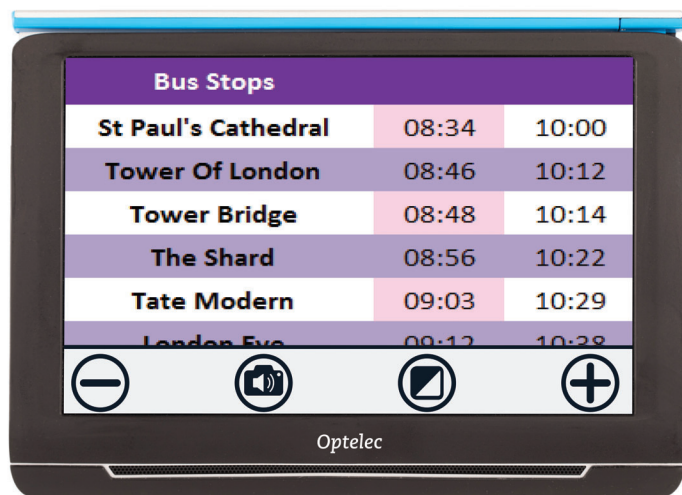

Para visualizar objetos a corta distancia, cierre el soporte, pulse el botón de Encendido / Apagado y dirija Compact 10 hacia lo que desea ver o leer. Están disponibles los botones siguientes:



Disminuir ampliación



Hacer una captura y escuchar el texto



Tocar: Cambiar vista

Pulsación larga: Modo Básico o Avanzado



Aumentar ampliación