


Mode Avancé

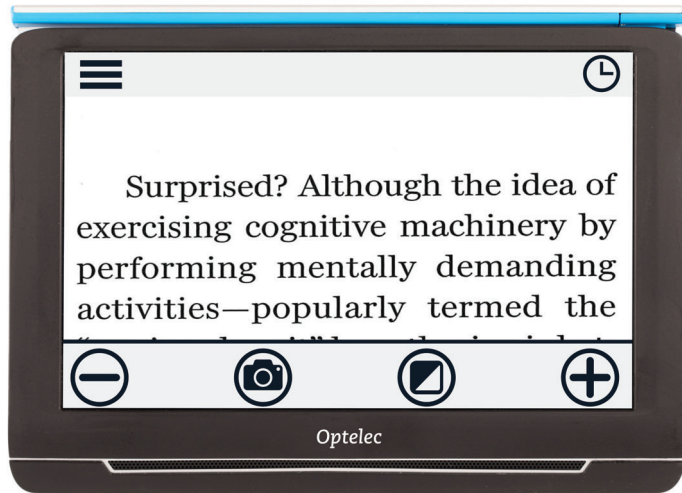

Pour basculer entre les modes Standard et Avancé, maintenez le bouton Mode enfoncé et sélectionnez votre choix.

En mode Avancé, les boutons suivants sont disponibles en plus des boutons du mode Standard:

 Entrée dans le menu

 Horloge



Mise en Route



1. Bras pivotant de la caméra: Pour voir des objets et des photographies, et pour signer, ouvrez le bras pivotant de la caméra afin d'avoir plus d'espace.

2. Bouton On / Off:


Appui court: Sommeil / Reprise

Appuyez pendant 6 secondes: On / Off

3. Prise audio: Utilisez la prise audio pour connecter un casque au Compact 10 HD.

4. Connecteur USB-C: Charge Compact 10 batterie HD avec câble USB fourni et chargeur. SVP, veuillez charger la pile avant la première utilisation.

Mode Standard

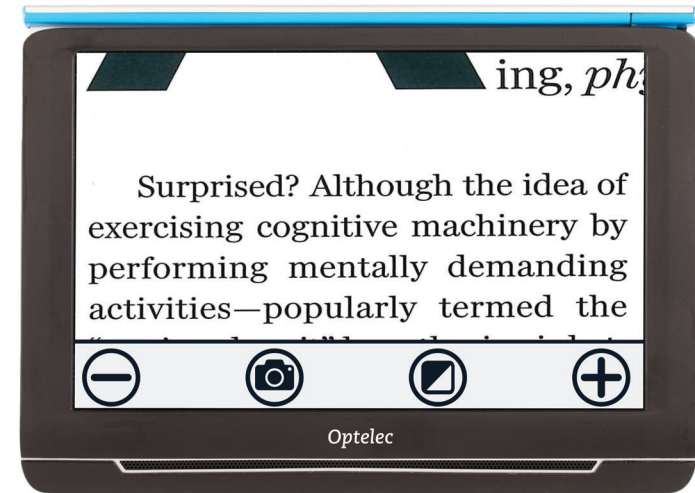

Pour basculer entre les modes Standard et Avancé, maintenez le bouton Mode enfoncé et sélectionnez votre choix.

En mode Standard, les boutons suivants sont disponibles:



Diminuer le grossissement



Prendre une photo temporaire



Appui court: Changer le mode de visualisation
Appui long: Mode Standard ou Avancé



Augmenter le grossissement