


# Modo Avanzado

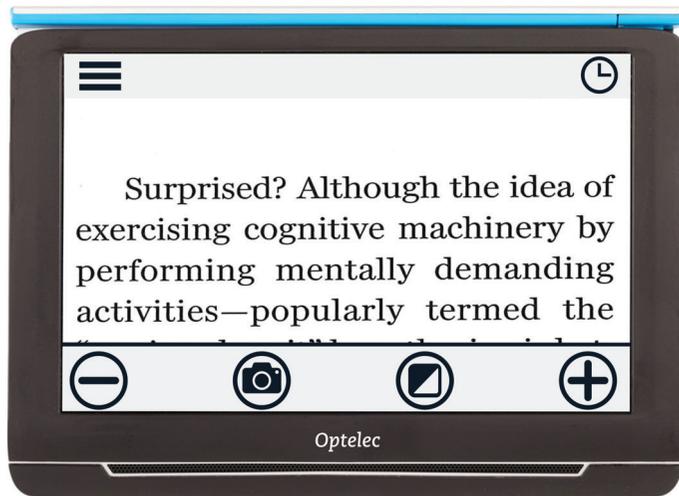

Para conmutar entre los modos Básico y Avanzado, toque y mantenga el botón Modo y seleccione una opción.


En el modo Avanzado están disponibles los siguientes botones además de los del modo Básico:



Abrir menú



Hora

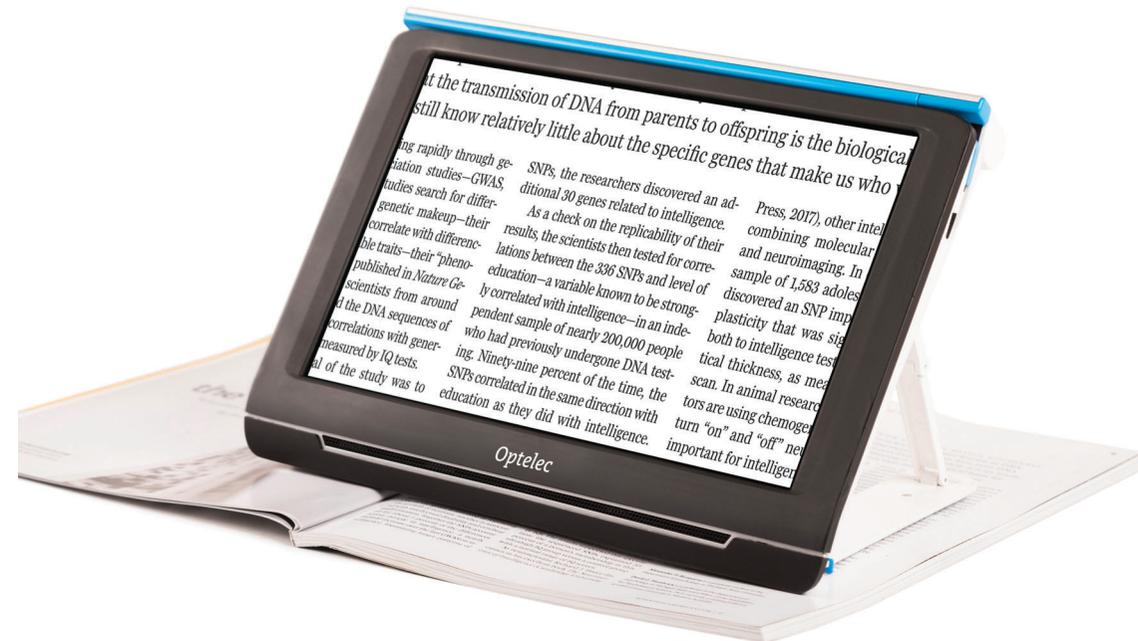

# Cómo empezar a trabajar



**1. Brazo desplazable:** Para visualizar objetos y fotos o para escribir su firma, abra el brazo desplazable para disponer de más espacio.

**2. Botón de encendido / apagado:**


Pulsación corta: suspender / reanudar.

Pulsar 6 segundos: encender / apagar.

**3. Conector de audio:** El conector de audio permite conectar auriculares a Compact 10 HD.

**4. Conector USB-C:** Cargue Compact 10 HD con el cable USB-C y el alimentador que se suministran con el equipo. Cargue la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

# Modo Básico

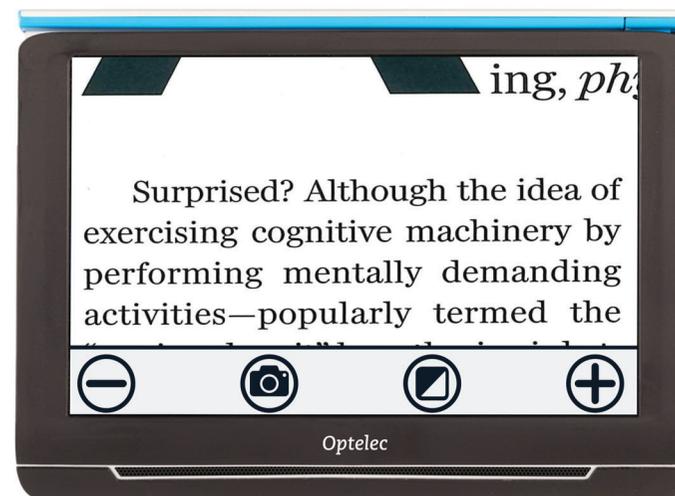

Para conmutar entre los modos Básico y Avanzado, toque y mantenga el botón Modo y seleccione una opción.

En el modo Básico están disponibles los siguientes botones:



Disminuir ampliación



Hacer captura



Tocar: Cambiar vista

Pulsación larga: Modo Básico o Avanzado



Aumentar ampliación